


## Catheters for Sonohysterography, Hysterosalpingography and Laparoscopy

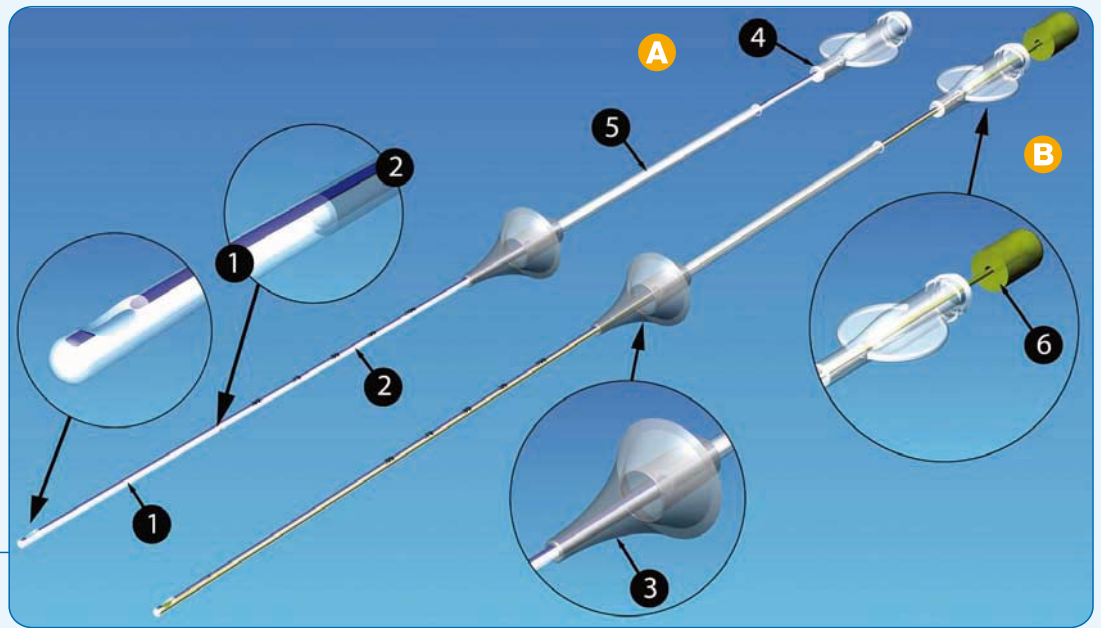

### A MININJECTOR

### B MININJECTOR CM

**Iniettori uterini per sonoisterografia**  
*Sonohysterography uterine catheters*

- Per l'iniezione di soluzione salina nelle procedure di sonoisterografia. Il dispositivo è costituito da:
    - Un catetere trasparente centimetrato (2), per un posizionamento facilitato; una riga radiopaca è presente su tutto il catetere per una migliore visibilità ecografica;
    - una punta morbida con foro all'estremità (1) per permettere l'introduzione della soluzione salina;
    - un introduttore rigido (5) che facilita l'inserimento nel collo dell'utero dello stopper costruito in morbido materiale plastico (3) che ne assicura la perfetta tenuta.
- Il catetere termina con un raccordo luer lock femmina (4) per la connessione della siringa.  
 È disponibile anche una versione con mandrino (6) (**MININJECTOR CM**) (B) per un accesso facilitato nella cavità uterina.

- To infuse saline solution into the uterine cavity in sonohysterography diagnostic procedure. The device is composed by:
    - a clear catheter with centimeter markings (2) for easy positioning into the uterine cavity; a blue radiopaque stripe is present all along the catheter to enhance visibility under ultrasound.
    - a side-holed soft tip (1) to allow saline infusion.
    - a rigid introducer (5) to advance soft rubber stopper (3) into uterus neck for a guarantee of perfect sealing. The catheter ends in a female luer-lock connector (4) for syringe connection.
- The device is also available with stylet (6) (**MININJECTOR CM**) (B) for easier introduction into the uterine cavity.

Cod.	Descrizione - Description
A 770314	Ø esterno 1,67 mm. - O.D. 1,67 mm. (5 Fr)
B 880314	Ø esterno 1,67 mm. - O.D. 1,67 mm. (5 Fr)

Scatola da 15 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

15 pcs. per box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.

