



METRASTOP

Post-partum Balloon



PRODOTTO ITALIANO




RI.MOS.

Disposable Medical Products

METRASTOP

• DOPPIO PALLONE MOLTO LEGGERO

(peso: 70gr)

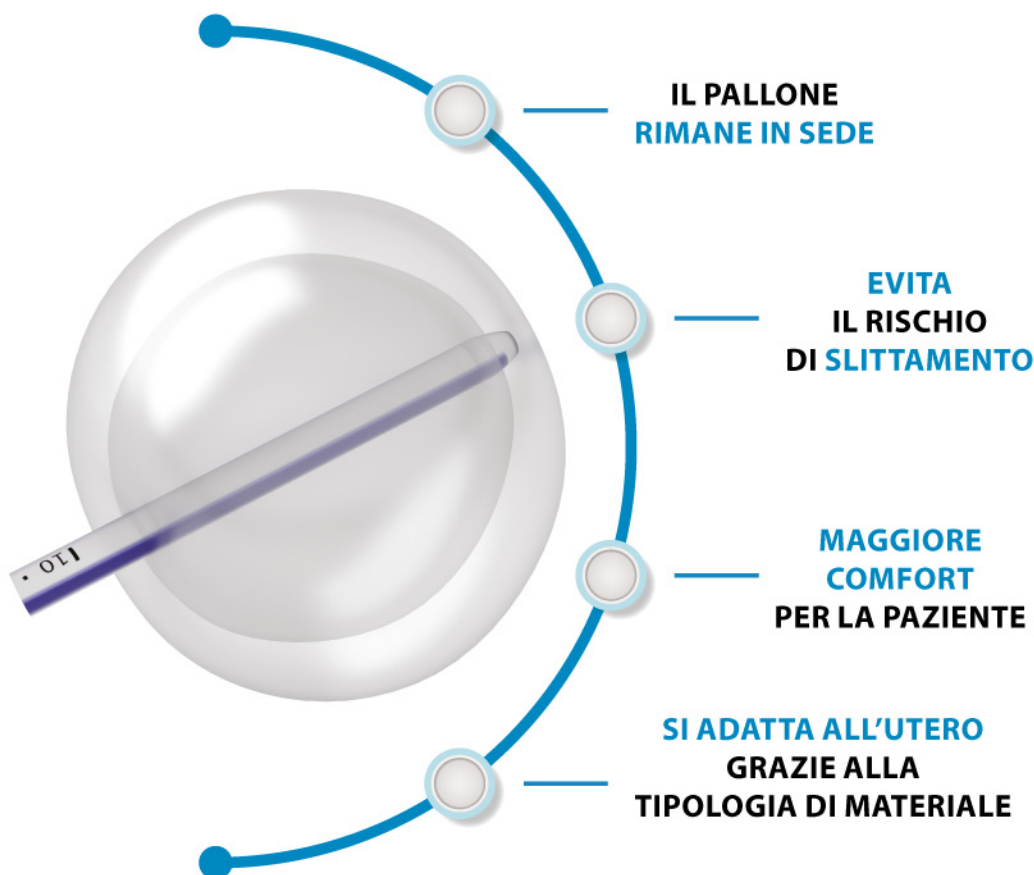

Post-partum Balloon

• STELO DEL CATETERE SEMIRIGIDO

FACILITÀ DI INSERIMENTO


(anche senza l'utilizzo di pinze)

FACILITÀ DI POSIZIONAMENTO

IN CASO DI MALPOSIZIONAMENTO
POSSIBILITÀ DI RIPOSIZIONARE IL CATETERE
IN MODO FACILE E VELOCE

PROCEDURA DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO
MOLTO VELOCE

La valvola di gonfiaggio
del **tubo trasparente** permette
di mantenere la siringa connessa
durante la procedura di gonfiaggio

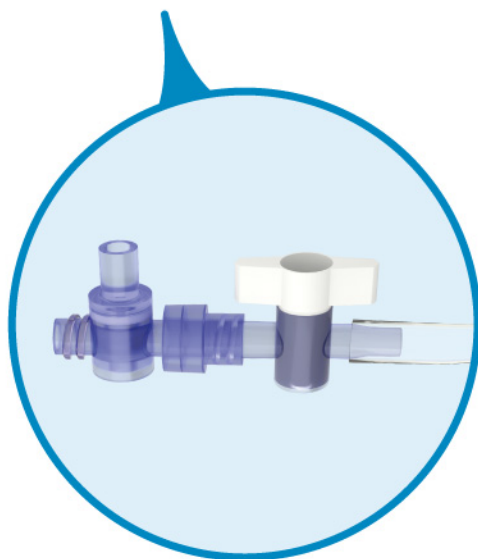


COME FUNZIONA?

1) GONFIAGGIO DEI PALLONI

1° PALLONE ESTERNO

Siringa da 60 ML di soluzione salina sterile → **TUBO DI COLORE BLU: "WATER"**
(chiudere il rubinetto)

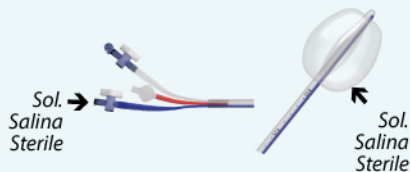


2° PALLONE INTERNO

Stessa siringa da 60 ML di aria → **TUBO TRASPARENTE: "AIR INFLATION"**
MAX 420 CC (CIRCA 7 POMPATE IN CONTINUO)
(chiudere il rubinetto)



2) COLLEGAMENTO SACCA DI DRENAGGIO

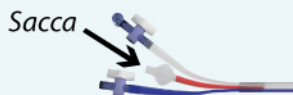


Sacca di raccolta fluidi (inclusa) → **TUBO DI COLORE ROSSO (DRENAGGIO)**

3) RIMOZIONE DEL CATETERE

1° PALLONE INTERNO

TUBO TRASPARENTE → Rimuovere la valvola e far fuoriuscire l'aria

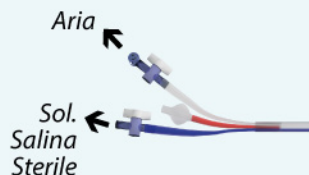

2° PALLONE ESTERNO

TUBO DI COLORE BLU → Aspirare il contenuto con una siringa

- È anche possibile tagliare i lumi del catetere per sgonfiare i palloncini -

Profilo Aziendale

RI.MOS. ha iniziato a progettare e vendere prodotti di ginecologia dal 1988. È l'unico fabbricante italiano di una gamma completa di prodotti monouso per la ginecologia/ostetricia e la fecondazione assistita. Tutti i prodotti vengono progettati all'interno dell'azienda e il processo di fabbricazione coinvolge collaboratori e fornitori con grande esperienza nella produzione di prodotti medicali.

Attraverso l'impiego di una moderna tecnologia produttiva, i prodotti **RI.MOS.** sono assemblati da personale qualificato in camere bianche **ISO 7** e **ISO 8**. Il sistema di qualità aziendale **RI.MOS.** è certificato secondo le **ISO 13485:2003**.

RI.MOS. è in grado di realizzare piccole produzioni personalizzate per soddisfare ogni esigenza del ginecologo privato e ospedaliero.

RI.MOS. è l'unica azienda italiana attivamente impegnata nello sviluppo e nella produzione di una gamma completa di dispositivi monouso utilizzati per l'inseminazione artificiale e la riproduzione assistita.

PRODOTTO ITALIANO



www.rimos.com



RI.MOS.

Disposable Medical Products



Info Ordine

Rev. Ottobre 2019



Pallone esterno da gonfiare con 60 ml di **soluzione salina sterile** (siringa inclusa)



Pallone interno da gonfiare con max 420 cc di **aria** (circa 7 pompate)

Codice	Descrizione	Fr	Lunghezza
720264	Scatola da 2 pz Confezione singola monouso* Sterilizzato ETO, marcato CE	24.0	54 cm

*Include una siringa da 60 ml e una sacca di drenaggio per monitorare l'emostasi



Per informazioni più dettagliate sull'uso, le precauzioni, le avvertenze e le controindicazioni del prodotto consultate il sito **www.rimos.com** e le istruzioni per l'uso complete.


COD. 740226



RIMOS.
Disposable
Medical Products

41037 Mirandola (Mo) - ITALY
Tel: 0535/25755 - Fax 0535/25509
info@rimos.com - www.rimos.com

Azienda Certificata

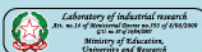

Dispositivo medico
classe IIa

CE 0051