


Vagistop

Dispositivo per la prevenzione e il trattamento delle emorragie vaginali in ginecologia e ostetricia

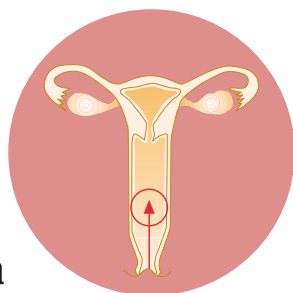

Per il trattamento e la prevenzione delle emorragie vaginali dopo chirurgia vaginale, traumi o post-partum, e per la prevenzione di ematomi vaginali.

- **Vagistop in Ginecologia:**

Trattamento e prevenzione delle emorragie vaginali ed ematomi dopo chirurgia vaginale o dopo traumi. Sostituisce l'impiego del tamponamento vaginale con garza. Gonfiaggio con aria.

Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ginecologico: **da 60 a 180 ml a seconda delle dimensioni vaginali.**

- **Vagistop in Ostetricia:**

Trattamento delle emorragie da lacerazioni vaginali postpartum e prevenzione di ematomi vaginali postpartum. Sostituisce l'impiego del tamponamento vaginale con garze.


Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ostetrico: **da 240 a 480 ml a seconda delle dimensioni vaginali.**

Vagistop quando gonfiato fino ad aderire alle pareti vaginali mantiene una pressione interna di circa 50 mmHg, superiore quindi alla pressione capillare pelvica, che varia da 21 a 48 mmHg.

Il pallone è stato testato fino a un gonfiaggio massimo di aria di 500 ml.

Cod.	Descrizione
720262	Pallone ad uso ostetrico e ginecologico

Scatola da 5 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato EtO e marcato CE.

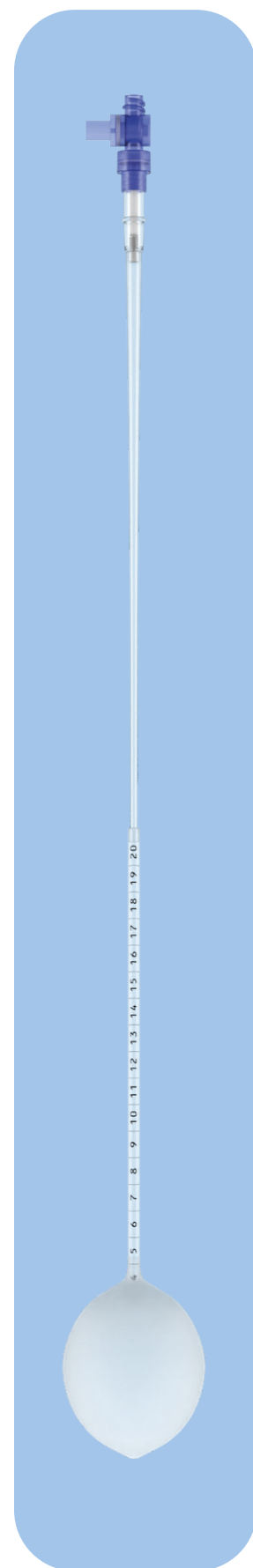

Tecnica del tamponamento per emorragia vaginale e prevenzione di ematomi




Vagistop balloon vaginale

INSERIMENTO

Inserire Vagistop fino al fornice posteriore.

1

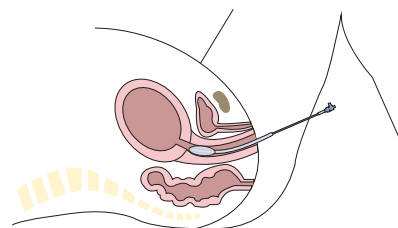

GONFIAGGIO DEL BALLOON

Connettere la siringa alla valvola di doppio controllo (valvola a 3 vie) e insufflare aria con pompate in continuo.


Per uso Ginecologico: da 60 a 180 ml

Per uso Ostetrico: da 240 ml a 480 ml

Gonfiare Vagistop fino a quando il balloon aderisce completamente alle pareti vaginali e l'estremità inferiore del pallone gonfiato è visibile attraverso l'ostio vulvare, esercitando una lieve trazione sul suo stelo.

La valvola permette di mantenere la siringa connessa durante la procedura.

2

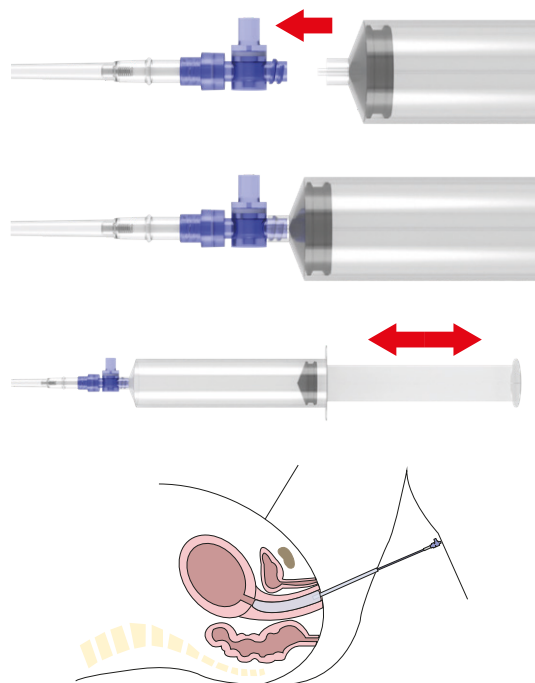


RIMOZIONE DEL BALLOON

Rimuovere la valvola a doppio controllo (valvola a 3 vie).

Premere con una siringa senza stantuffo sul bottone della valvola posizionata alla base dello stelo e sfilare Vagistop.

È anche possibile tagliare il lume del catetere fino a sgonfiaggio completo del balloon.

3

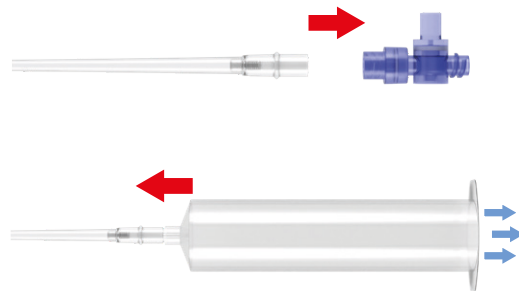

RIMOS s.r.l.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

Per informazioni più dettagliate sull'uso, le precauzioni, le avvertenze e le controindicazioni del prodotto consultare il sito www.rimos.com e le istruzioni per l'uso complete.