


Doublecyte-N

Aiguille à double lumière pour le prélèvement d'ovocytes et le rinçage folliculaire

Aguja de doble conducto para extracción de ovocitos y lavado folicular

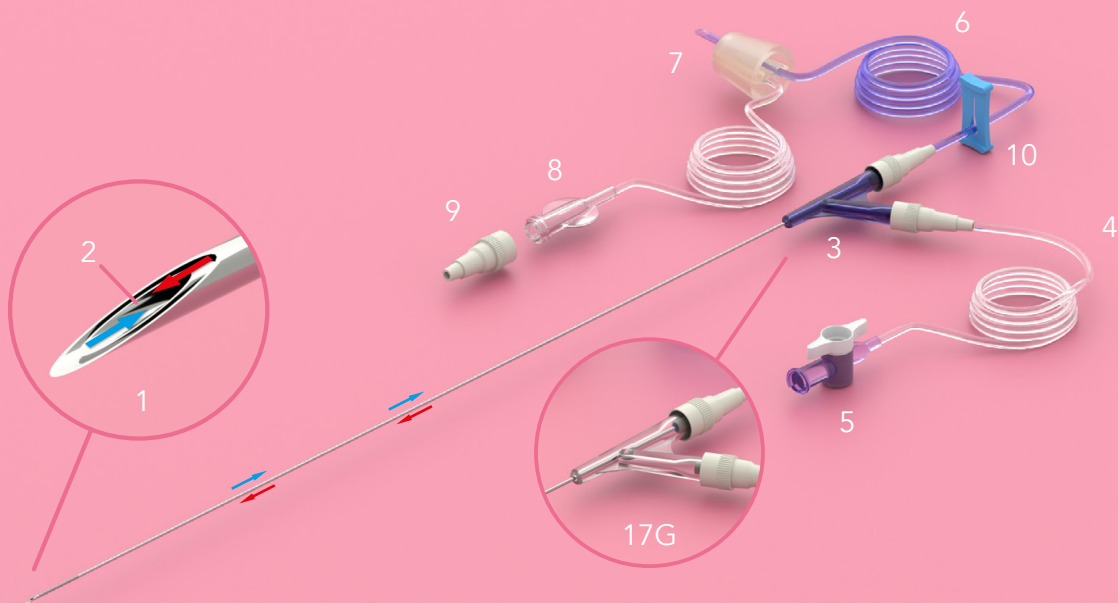

Aiguille à double lumière et double voie, la première pour l'aspiration des ovocytes (6) et la seconde pour le rinçage folliculaire (4), constituée de :

- pointe échogène avec biseau atraumatique (1);
 - une lumière interne de l'aiguille (2) pour l'aspiration des ovocytes se poursuit à travers un tube bleu (6) qui protège l'ovule des rayons UV;
 - un bouchon médical en caoutchouc thermoplastique (7) qui se connecte au tube à essai;
 - un raccord en Y (3) (muni de 2 raccords universels) qui sert également de poignée, relie l'aiguille aux tuyaux d'aspiration et de rinçage;
 - un tuyau transparent (4) de 100 cm de longueur pour le rinçage folliculaire se termine par un robinet (5).
- Le rinçage s'effectue à travers la lumière externe de l'aiguille.
- une clé serre-tube (10) qui régule l'aspiration folliculaire.

Le raccordement à la pompe d'aspiration est disponible avec rallonge de 80 cm qui se termine par un raccord luer lock (8). Adaptateur universel supplémentaire (9) pour une variété de connexions.

Aguja de dos conductos y dos vías, la primera para la aspiración de ovocitos (6) y la segunda para el lavado folicular (4), compuesta por:

- punta ecogénica con afilado no traumático (1);
- un conducto interno de la aguja (2) para la aspiración de ovocitos continúa a través de un tubo azul celeste (6) que protege al ovocito de la radiación UV;
- un tapón de goma termoplástica médica (7) que se conecta a la probeta;
- un conector en Y (3), que también sirve de empuñadura, conecta la aguja con los tubos de aspiración y lavado (dotado de 2 conectores universales);
- un tubo transparente de 100 cm de longitud (4) para el lavado folicular termina con una válvula (5). El lavado tiene lugar a través del conducto externo de la aguja.
- una abrazadera (10) que regula la aspiración folicular.

La conexión a la bomba de aspiración está disponible con extensión de 80 cm que termina en un conector luer lock (8). Se incluye un adaptador universal adicional (9) para una variedad de conexiones.

Code Cód.	Couleur Color	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
770301/TL	Luer Lock Bleu clair Luer Lock Azul celeste	16 G x 330 mm	10 pièces/uds.
770308/TL	Luer Lock Transparent Luer Lock Transparente	17 G x 330 mm	

