

Metrastop

Cathéter avec ballon pour hémorragie utérine post-partum

Catéter con balón para hemorragia uterina posparto

 Pour le contrôle et la réduction temporaire du saignement utérin post-partum lorsqu'une prise en charge conservatrice est indiquée.

Cathéter doté de 2 ballons:

un ballonnet externe (1) à gonfler avec une solution stérile (gonflage maximum 60 ml) par le tube bleu (3) «eau»; un ballonnet interne (2) à gonfler avec de l'air à travers le tube transparent «gonflage à l'air» (gonflage recommandé 350 cc d'air équivalent à 6 coups de la seringue de 60 ml fournie; gonflage maximum: 420 cc).

La valve spéciale de gonflage (4) du tube transparent permet un pompage d'air en continu.

Le tuyau de drainage rouge (5) doit être connecté au sac collecteur (6) fourni.

La disposition des ballonnets permet au dispositif d'être très léger, évitant ainsi le risque de glissement du ballon.

La procédure de gonflage et dégonflage est très rapide.

Possibilité de repositionner le cathéter en cas de mauvais positionnement.

Facilité d'utilisation par le médecin et confort absolu pour la patiente.

Le kit se compose du cathéter, de la seringue de 60 ml et de la poche de récupération de liquides.

 Para el control o la reducción temporal de la hemorragia uterina posparto en casos donde esté indicado el tratamiento terapéutico conservador.

Catéter con 2 balones:

uno externo (1) para inflar con solución estéril (inflado máximo de 60 ml) a través del tubo azul (3) "water"; uno interno (2) para inflar con aire a través del tubo transparente "air inflation" (inflado recomendado de 350 cc de aire equivalente a 6 accionamientos de la jeringa de 60 ml suministrada; inflado máximo: 420 cc).

La válvula especial de inflado (4) del tubo transparente permite el bombeo continuo de aire.

El tubo de drenaje rojo (5) debe conectarse a la bolsa de recogida (6) suministrada.

La disposición de los balones permite que el dispositivo sea muy ligero, evitando así el riesgo de deslizamiento del balón.

El procedimiento de inflado y desinflado es muy rápido.

Posibilidad de repositionar el catéter en caso de no haberlo colocado correctamente.


Facilidad de uso por parte del médico y absoluta comodidad para la paciente.



El kit se compone del catéter, la jeringa de 60 ml y la bolsa de recogida de fluidos.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720264	Longueur 54 cm - Ø extérieur 24 Fr Longitud 54 cm - Ø exterior 24 Fr	2 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

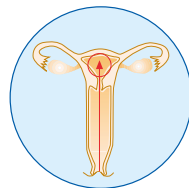

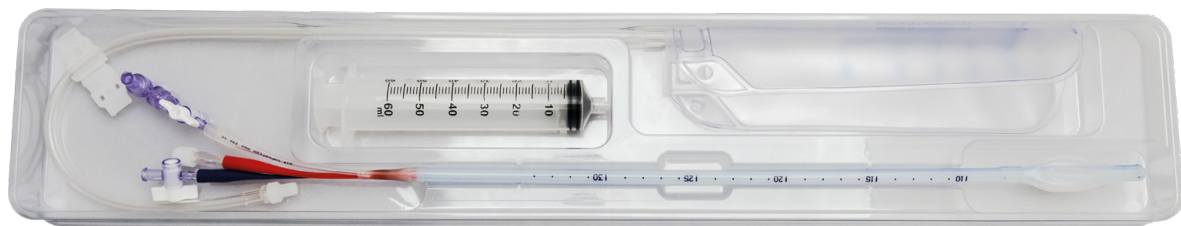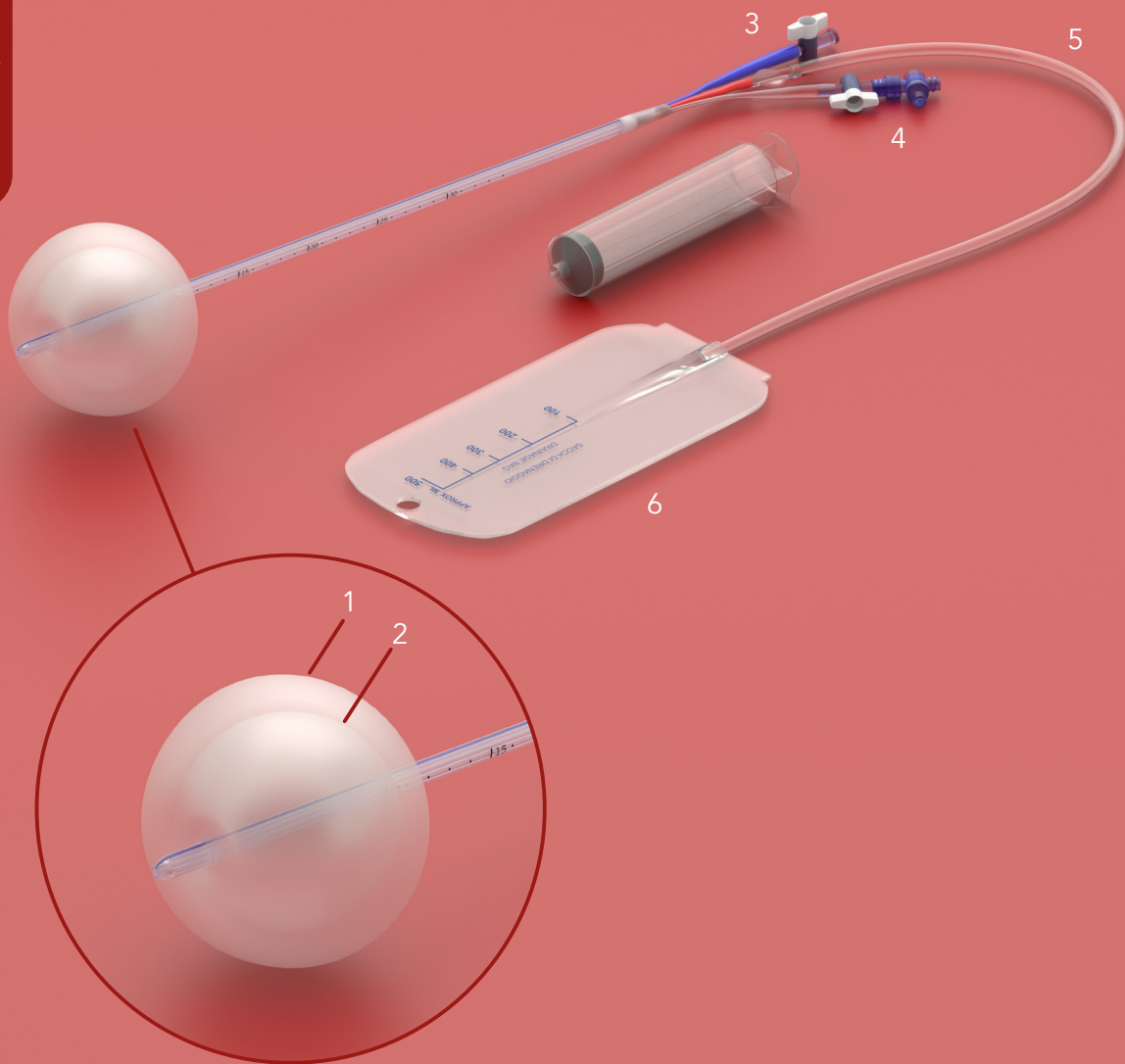

Le set se compose du cathéter, de la seringue de 60 ml et de la poche de récupération de liquides.

El kit se compone del catéter, la jeringa de 60 ml y la bolsa de recogida de fluidos.