


Vagistop

Dispositif pour la prévention et le traitement des hémorragies vaginales en gynécologie et obstétrique

Dispositivo para la prevención y el tratamiento de las hemorragias vaginales en ginecología y obstetricia

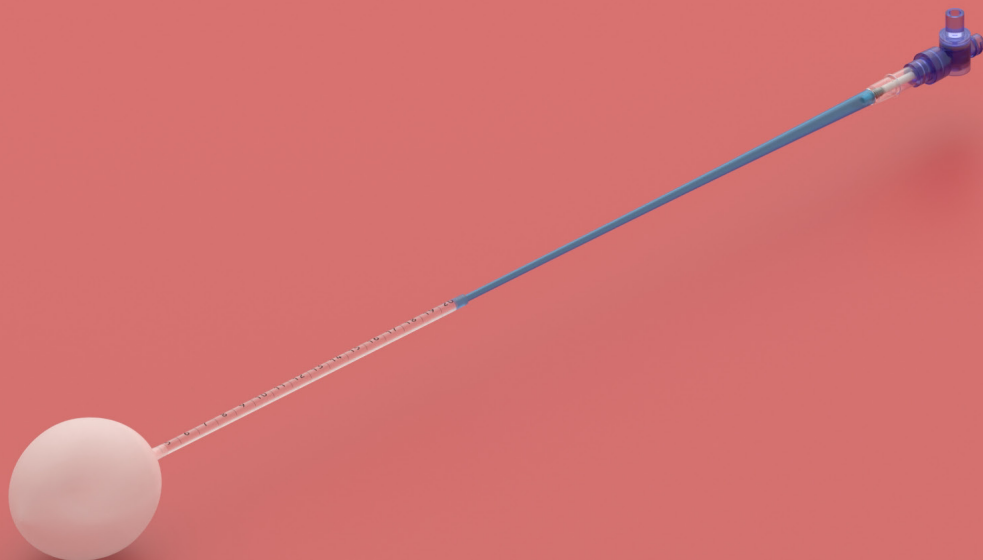

• Vagistop en Gynécologie:

traitement et prévention des hémorragies vaginales et des hématomes après une chirurgie vaginale ou traumatisme. Il remplace le tamponnement vaginal avec bandes de gaze.

Volumes de gonflage recommandés pour un usage gynécologique: de 60 à 180 ml selon la taille du vagin.

• Vagistop en Obstétrique:

traitement des hémorragies vaginales suite à déchirures du post-partum et prévention des hématomes vaginaux. Il remplace l'utilisation du tamponnement vaginale avec bandes de gaze.

Volumes de gonflage recommandés en obstétrique: de 240 à 480 ml selon la taille du vagin.

Vagistop lorsqu'il est gonflé pour adhérer aux parois vaginales maintient une pression interne d'environ 50 mmHg, donc supérieure à la pression capillaire pelvienne, qui varie de 21 à 48 mmHg.

Le ballon a été testé jusqu'à un gonflage maximum d'air de 500 ml.



• Vagistop in Gynecologia:

tratamiento y prevención de las hemorragias vaginales y hematomas tras intervenciones quirúrgicas vaginales o tras traumatismos.

Sustituye el uso del taponamiento vaginal con gasas.

Volúmenes de inflado recomendados para uso ginecológico: de 60 a 180 ml según el tamaño de la vagina.

• Vagistop in Obstetrics:

tratamiento de las hemorragias producidas por desgarros vaginales posparto y prevención de hematomas vaginales posparto.

Sustituye el uso del taponamiento vaginal con gasas.

Volúmenes de inflado recomendados para uso obstétrico: de 240 a 480 ml según el tamaño de la vagina.

Cuando se infla Vagistop hasta quedar adherido a las paredes vaginales, mantiene una presión interna de aproximadamente 50 mmHg, es decir, superior a la presión capilar pélvica, que varía entre 21 y 48 mmHg. El balón ha sido probado hasta un inflado máximo de 500 ml de aire.

Code Cód.	Description Descripción	Pièces/boîte Uds./Caja
720262	Longueur 46,3 cm - Ø 4,5 mm (13,5 Fr) Longitud 46.3 cm - Ø 4.5 mm (13.5 Fr)	5 pièces/uds.

Emballé sous sachet individuel - usage unique - stérilisation EtO - marqué CE 0051

Se suministra en un solo paquete - desechable - esterilización por EtO - marcado CE 0051

