


# Vagistop

Dispositivo per la prevenzione e il trattamento delle emorragie vaginali in ginecologia e ostetricia

*Device for prevention and treatment of vaginal bleeding in gynecology and obstetrics*

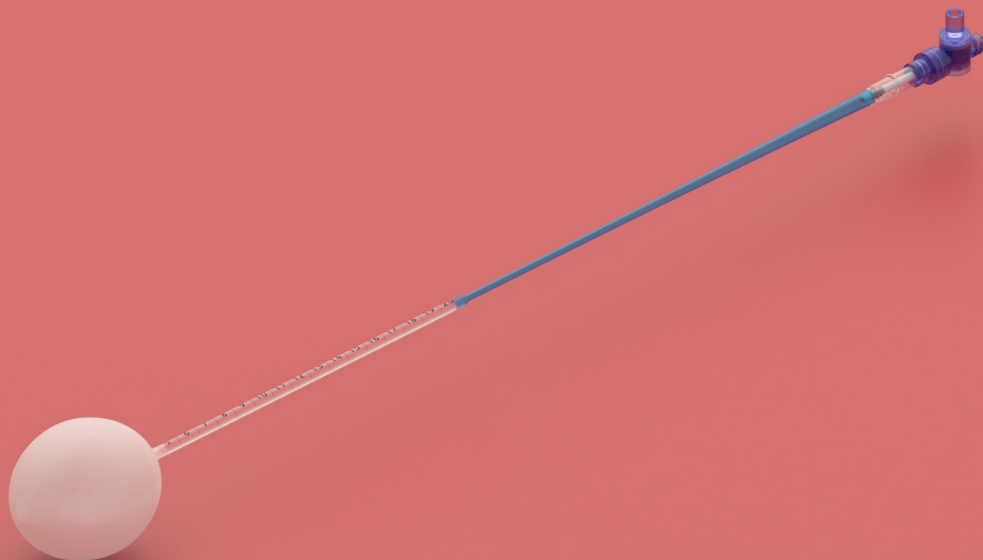

## • Vagistop in Ginecologia:

trattamento e prevenzione delle emorragie vaginali ed ematomi dopo chirurgia vaginale o dopo traumatismi.

Sostituisce l'impiego del tamponamento vaginale con garze.

Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ginecologico: da 60 a 180 ml a seconda delle dimensioni vaginali.

## • Vagistop in Ostetricia:

trattamento delle emorragie da lacerazioni vaginali postpartum e prevenzione di ematomi vaginali postpartum.

Sostituisce l'impiego del tamponamento vaginale con garze.

Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ostetrico: da 240 a 480 ml a seconda delle dimensioni vaginali.

Vagistop quando gonfiato fino ad aderire alle pareti vaginali mantiene una pressione interna di circa 50mmHg, superiore quindi alla pressione capillare pelvica, che varia da 21 a 48 mmHg.

Il pallone è stato testato fino a un gonfiaggio massimo di aria di 500 ml.



## • Vagistop in Gynecology:

prevention and treatment of vaginal bleeding and hematoma after vaginal surgery or after trauma.

It replaces the use of vaginal infill with gauzes.

Recommended inflation volumes for Gynecological use: from 60 to 180 ml depending on the vaginal size.

## • Vagistop in Obstetrics:

treatment of bleeding from postpartum vaginal tears and prevention of postpartum vaginal hematoma.

It replaces the use of vaginal infill with gauzes.

Recommended inflation volumes for Obstetric use: from 240 to 480 ml depending on vaginal size.

When inflated to adhere to the vaginal walls Vagistop maintains an internal pressure of about 50 mmHg, therefore higher than the pelvic capillary pressure, which varies from 21 to 48 mmHg.

Tested up to a maximum air inflation of 500 ml.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720262	Lunghezza 46,3 cm - Ø 4,5 mm (13,5 Fr) Length 46.3 cm - Ø 4.5 mm (13.5 Fr)	5 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

